

Раствор/ систем	Земја или регион на потекло	Квалификув ана употреба	Активна состојка	Тип на средства за дезинфек ција	Колони Компатибилност							
					1	2	3	4	5	6	7	8
trophon EPR	AU	trophon EPR Reprocessor	Хидроген пероксид	HLD	T,C ⁸	T,C ⁸	N	N	N	N	T,C ⁸	N
Vaposeptol	FR	Прскање/ Пребришува ње	Алкохол, бигванид	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Virox 5 RTU	CA	Пребришува ње	Хидроген пероксид	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wavicide -01	US	Киснење ¹	Глутаралдехид	HLD, S	T,C ⁸	T,C ⁸	N	T	T	T	T,C ⁸	T
Wip'Anios Excel	FR	Пребришува ње	QUAT, бигуанид, сурфактант	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wip'Anios Premium	FR	Пребришува ње	QUAT, бигуанид, сурфактант	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C

1. Никогаш немојте да потопувате и киснете приклучок. Овие производи може да се користат во автоматизирани репроцесори (AR) согласно постапките во документот *Грижа и чистење на системите за ултразвук и на сондите*.
2. Antigermix S1 и Hypernova Chronos не се одобрени за 3D6-2, 3D8-4, V6-2, V8-4, V9-2, VL13-5 или VL13-5 Compact.
3. Oxygenon-I и Revital-Ox RESERT може да предизвикаат мала промена на бојата во флексибилниот отвор на сондите S7-3t и S8-3t. Оваа промена на бојата нема влијание на сигурноста или работата на уредот.
4. Благите раствори на сапун не содржат груби состојки и не ја иритираат кожата. Не треба да содржат парфем, масла или алкохоли. Не е одобрена употребата на средства за дезинфекција на дланки.
5. Antigermix E1 може да ги обезбоди пластичните делови од трансезофагијалните сонди.

6. За специфичните раствори употребени со овој автоматизиран репроцесор, погледнете „Принципи на AR (автоматизиран репроцесор)“ на страница 21.
7. За специфичните раствори употребени со овој автоматизиран уред за дезинфекција, погледнете „Упатства за автоматизирани дезинфектори и дезинфектори со чистачи на TEE-сонди“ на страница 24.
8. Одобрени само за кабли; не е одобрено за приклучоци.
9. За специфичните раствори употребени со овој автоматизиран репроцесор (трансвагинални и трансректални сонди само), погледнете „Принципи на AR (автоматизиран репроцесор)“ на страница 21.
10. Кога системот ETHOS се користи според упатствата на етикетата, не го изложува конекторот на сондата на хемикалиите за чистење и дезинфекција.
11. Овој систем не е одобрен за V6-2, V8-4 или VL13-5 поради ограничување на геометријата.

www.philips.com/healthcare



Philips Ultrasound LLC
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

CE 2797



© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Сите права се задржани. Репродукцијата или преносот во целост или делумно во кој и да е облик и со кои и да е средства, електронски, механички или други, е забрането без претходна писмена дозвола на сопственикот на авторското право.

Објавено во САД

3000 131 84881_A/795 * МАРТ 2024 - mk-MK